

medi pcs

sistema de compressão pneumática


Peça de roupa

Aplicação e Manutenção da Roupa

Braço

Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Tamanho	Comprimento do braço	Circunferências	
		Pulso (C)	Axila (G)
Pequeno	50-57	14-42	21-57
Regular	58-66		
Longo	66-74		

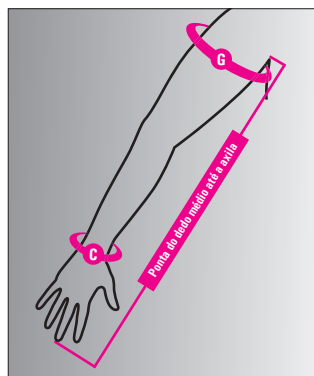


Medidas de dimensionamento da peça do braço

Perna inferior

Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Tamanho	Comprimento da perna	Circunferências	
		Tornozelo (B)	Panturrilha (C)
Regular	34-43	18-56	24-61
Longo	43-51		

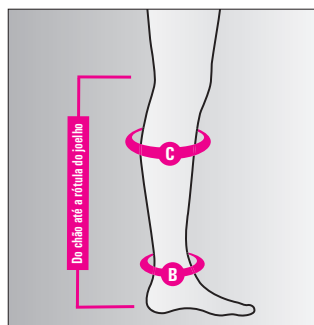


Medidas de dimensionamento de perna inferior

Perna inteira

Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Tamanho	Comprimento da perna	Circunferências		
		Tornozelo (B)	Panturrilha (C)	Coxa (G)
Pequeno-Curto	64-70	18-56	24-61	41-79
Pequeno-Regular	71-77			
Pequeno-Longo	78-85			
Médio-Pequeno	64-70	36-74	39-76	52-89
Médio-Regular	71-77			
Médio-Longo	78-85			
Grande-Pequeno	64-70	48-85	51-88	61-98
Grande-Regular	71-77			
Grande-Longo	78-85			

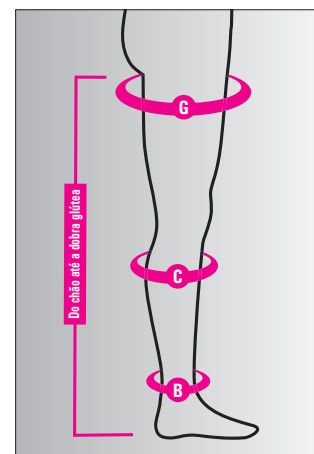

Medidas de dimensionamento de perna inteira

O vestuário é de peças de câmara de ar que são feitas de tecido macio e maleável (100% náilon). Elas são projetadas para se ajustarem aos contornos do corpo, envolvendo o(s) membro(s) e prendendo-as com fixadores de gancho e alça. Elas contêm câmaras de ar sobrepostas que inflam e desinflam sequencialmente.

- **Roupa de braço** contêm oito (8) ou dez (10) câmaras
- **Roupas inferiores** contêm seis (6) câmaras
- **Roupas completas** contêm oito (8) ou dez (10) câmaras

Também estão disponíveis para venda em separado mangas para vestir por baixo das roupas, mas não são necessárias.

Cuidado e limpeza

Guarde as peças enrolando frouxamente as mangueiras e os conectores de roupa. Evite torcer ou esmagar as mangueiras. Coloque as roupas sem dobrar em um local fresco e seco para armazenamento.

Verifique se as peças de roupa estão desconectadas da PCU antes de limpá-las. Limpe suavemente a roupa com um pano levemente úmido, umedecido com sabão neutro anti-bacteriano ou solução de álcool isopropílico a 70%. Não permita que nenhuma umidade ou líquido entrem nas entradas de ar dos conectores de roupa. Depois de limpar com um pano úmido, seque bem a roupa de compressão com uma toalha ou pano macio e deixe secar completamente no ar. Não use alvejante nem ferro e não lave ou seque as roupas a máquina.

Aplicação

Não conecte as peças de roupa à unidade de controle de pressão (PCU) até que as roupas tenham sido aplicadas nos membros apropriados para evitar puxões ou movimentos acidentais da PCU.

Remova quaisquer joias, relógios ou outros itens que possam causar danos à peça antes de aplicar.

Se desejar, aplique um revestimento sobre o membro antes de aplicar a peça. Isso ajudará a manter a roupa limpa durante o uso. Roupas soltas e não-restritivas, como calças de moletom ou camisetas de algodão, também podem ser usadas, desde que a roupa seja segura para ser comprimido contra a pele e não cause danos à peça.

Roupa de pernas

Existem dois métodos de aplicação:

Método A:

Passo 1: Modele a peça de roupa de maneira frouxa na forma da sua perna e aperte as abas do gancho (4.1).

Passo 2: Com a parte do pé da roupa mais afastada de você, deslize a perna até o joelho (na parte inferior da perna, mostrada em 4.2) ou na parte superior da coxa (para a perna inteira, mostrada na 4.3). **Observação:** Não fique de pé ou ande enquanto estiver usando roupas de perna. A foto é apenas para fins ilustrativos.

Passo 3: Reajuste o material de gancho e alça da peça, se necessário, de modo que ela se encaixe de forma segura, mas confortável, na sua perna (4.4). À medida em que a peça inflar, o produto aplicará compressão de forma inteligente, com base no tamanho do seu membro, de modo que não é necessário que a peça tenha um ajuste perfeito ou que você aplique a compressão ao vestir.



(4.1)



(4.2)



(4.3)



(4.4)

Roupa de pernas

Método B:

Passo 1: Enquanto está sentado ou deitado, desfaça o material de gancho e alça da roupa e abra a roupa (4.5).

Passo 2: Coloque o pé na seção do pé da peça com o calcanhar confortavelmente posicionado no bolso do calcanhar (4.6).

Passo 3: Começando pelo tornozelo, prenda a peça no lugar ao redor da perna usando o material de gancho e alça (4.7). À medida que a peça é insuflada, aplica-se a compressão, de modo que não é necessário que a peça tenha um bom ajuste ou aplicar a compressão da colocação.

Passo 4: Continue prendendo a peça até a perna toda ficar firme (4.8). Quando aplicada, a peça deve estar confortavelmente segura, mas não tão apertada que aplique compressão. Perna inteira totalmente aplicada mostrada em (4.9). **Observação:** Não fique de pé ou ande enquanto estiver usando roupas de perna. A foto é apenas para fins ilustrativos.

Seus dedos podem ou não se estender a partir do final da peça, dependendo do tamanho do pé. A peça de roupa não deve ser aplicada com tanta força que aplique compressão sem inflação, e ela nunca deve doer. O conector de roupa deve se estender a partir do final da peça mais próxima do calcanhar.



(4.5)



(4.6)



(4.7)



(4.8)



(4.9)

Roupas do braço

Passo 1: Forme a peça de maneira frouxa até a forma do braço e aperte as abas do gancho (4.10). Use o painel de gancho mais externo para braços de circunferência maiores. Dobre o painel debaixo de si e use o painel de gancho interno para braços de circunferência menores.



(4.10)

Passo 2: Com a extremidade curva da peça mais próxima de você, deslize seu braço para dentro da peça até que ela atinja sua axila (4.11).



(4.11)

Passo 3: Assegure-se de que a borda curva da peça de roupa, esteja posicionada no lado externo do ombro (4.12). A extremidade reta da peça deve ser posicionada sobre a mão. Reajuste o material de gancho e alça da peça de roupa, se necessário, de modo que ela se encaixe com segurança, porém confortavelmente, em seu braço. À medida em que a peça inflar, o produto aplicará compressão de forma inteligente, com base no tamanho do seu membro, de modo que não é necessário que a peça tenha um ajuste perfeito ou que você aplique a compressão ao vestir.



(4.12)

Seus dedos podem ou não se estender a partir do final da peça, dependendo do comprimento do seu braço. Quando aplicada, a peça de roupa não deve ser tão apertada que aplique compressão e ela nunca deve doer. O conector de roupa deve se estender a partir do final da peça mais próxima do pulso.

Remoção de peça de roupa

Desconecte a peça da PCU e deixe que ela se esvazie conforme necessário. Para remover a peça, deslize o membro para fora da peça ou desengate o material de gancho e alça e remova ela do membro. Recomenda-se manter o material de gancho e alça presos mesmo quando a peça não estiver em uso para evitar que ele se prenda a roupas, lençóis ou outros materiais.

Segurança



Aviso: Perigo de explosão
Não use na presença de gases inflamáveis, incluindo anestésicos inflamáveis.



Aviso: Perigo de choque elétrico
Não permita que líquidos entrem em qualquer parte do sistema.



Aviso: Perigo de choque elétrico
Nunca tente efetuar manutenção ou consertar o dispositivo enquanto estiver em uso. Para eliminar completamente a energia, desconecte a fonte de alimentação da Unidade de Controle de Pressão ou da tomada da parede.



Aviso: Perigo de choque elétrico
Para evitar choque elétrico, não abra a Unidade de Controle de Pressão. Não tente reparar a unidade de controle de pressão por conta própria. Todas as tarefas de manutenção devem ser executadas apenas pelo fabricante ou por pessoal de manutenção autorizado. Manutenção efetuada por pessoal não autorizado anulará a garantia.



Aviso: Perigos relacionados a ventilação
Coloque sempre a bomba em uma superfície sólida e livre de objetos que possam bloquear as aberturas de ventilação. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação. Mantenha a abertura de ventilação livre de detritos, como fiapos e cabelos. Nunca opere a bomba em uma superfície macia, como uma cama, sofá ou travesseiro, onde a abertura de ventilação possa estar bloqueada. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura da bomba.



Aviso: Perigos ambientais
Mantenha a bomba, a roupa e o cabo de alimentação longe de objetos afiados, chamas e superfícies aquecidas.



Aviso: Inspeção adequada necessária
Antes de usar, sempre inspecione a unidade de controle de pressão, a fonte de alimentação, as roupas e os para ver se não há danos.



Aviso: Acionamento acidental
Nunca opere o controlador onde o cabo ou o chicote de tubulação irão apresentar um risco de acionamento acidental.



Aviso: Estrangulamento
A fonte de alimentação e as mangueiras deste produto podem representar um risco de estrangulamento. Mantenha sempre a fonte de alimentação e mangueiras fora do alcance das crianças.



Aviso: Lesões de contato
A Unidade de Controle de Pressão deve ser colocada na mesma altura ou abaixo do paciente para evitar possíveis ferimentos ocasionados pela queda do dispositivo sobre o paciente.



Aviso: O tratamento nunca deve doer
A compressão de roupa nunca deve doer. Se sentir dor ou perceber que sua condição está piorando, entre em contato com seu médico. Não altere suas configurações de tratamento sem consultar seu médico.



Aviso: Supervisão dos pais
Crianças menores de 18 anos somente podem usar o sistema sob a supervisão de um adulto e instrução de um médico.



Cuidado: Uso por paciente individual
As peças de roupa destinam-se apenas ao uso não ambulatorial por paciente individual.



Cuidado: Compatibilidade
Use apenas a fonte de alimentação do medi pcs (GSM60B24), peças de roupa e acessórios com o sistema medi pcs.

Para obter informações sobre cuidados e manutenção de sua unidade de controle de pressão (PCU), montagem do sistema, programação de tratamento, solução de problemas ou informações técnicas, consulte o Manual do Operador incluído na PCU medi pcs. Para traduções em outras línguas, por favor visite www.mediusa.com.