



medi pcs

sistema de compresión neumática


Funda

Guía de colocación y mantenimiento

Brazo

Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a sus propias medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Tamaño	Longitud del brazo	Circunferencias	
		Muñeca (C)	Axila (G)
Corto	50-57	14-42	21-57
Regular	58-66		
Largo	66-74		

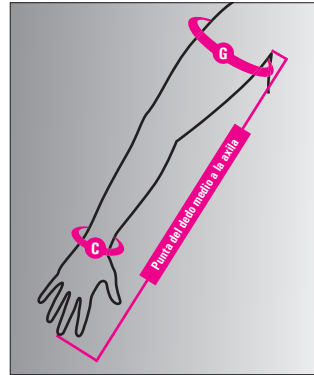


Medidas de la funda para brazo

Parte baja de la pierna

Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a sus propias medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Tamaño	Longitud de la pierna	Circunferencias	
		Tobillo (B)	Pantorrilla (C)
Regular	34-43	18-56	24-61
Largo	43-51		

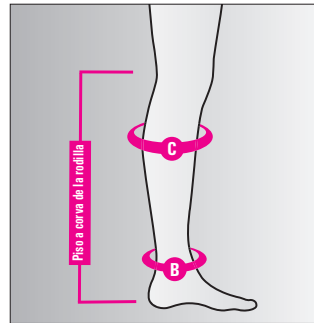


Medidas de la parte inferior de la pierna

Pierna completa

Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a sus propias medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Tamaño	Longitud de la pierna	Circunferencias		
		Tobillo (B)	Pantorrilla (C)	Muslo (G)
Pequeña-Corta	64-70	18-56	24-61	41-79
Pequeña-Regular	71-77			
Pequeña-Larga	78-85			
Mediana-Corta	64-70	36-74	39-76	52-89
Mediana-Regular	71-77			
Mediana-Larga	78-85			
Grande-Corta	64-70	48-85	51-88	61-98
Grande-Regular	71-77			
Grande-Larga	78-85			

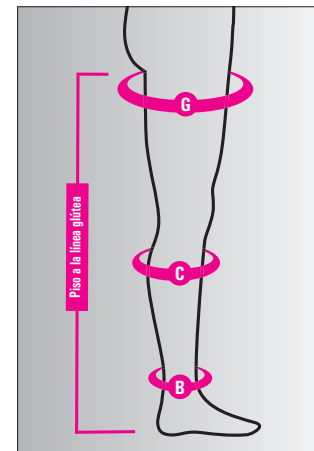

Medidas para funda de pierna completa

Las fundas tienen cámaras de aire hechas con tela suave y plegable (100% nailon). Están diseñadas para adaptarse al contorno del cuerpo al envolver las extremidades y se fijan con cintas de gancho y bucle. Contienen cámaras de aire superpuestas que se inflan y desinflan en secuencia.

- Las fundas para brazo tienen ocho (8) o diez (10) cámaras
- Las fundas para la parte inferior del cuerpo tienen seis (6) cámaras
- Las fundas para pierna completa tienen ocho (8) o diez (10) cámaras

Las mangas que se usan debajo de las fundas se pueden comprar por separado, aunque no son indispensables.

Cuidado y limpieza

Las fundas se almacenan enrollando primero las mangueras y conectores. Evite doblar o aplastar las mangueras. Para guardarlas, coloque las fundas sobre una superficie horizontal en un lugar fresco y seco.

Cerciórese que de las fundas estén desconectadas de la UCP (unidad de control de presión) antes de iniciar su limpieza. Limpie con suavidad la funda con un trapo ligeramente humedecido con un jabón neutro antibacteriano o con una solución de 70% de alcohol isopropílico. No permita que entre humedad o líquido en las tomas de aire de los conectores de la funda. Una vez que haga la limpieza con el trapo humedecido, seque perfectamente la funda de compresión con una toalla o trapo suave y luego deje que seque completamente al aire. No aplique blanqueador, no planche ni lave o seque a máquina las fundas.

Aplicación

No conecte las fundas a la unidad de control de presión (UCP) hasta después de haber colocado las fundas a las extremidades correspondientes para prevenir tirones o movimientos imprevistos de la UCP.

Quítese las joyas, reloj y otros artículos que puedan causar daños a la funda antes de colocársela.

Si lo desea, póngase una manga o forro en la extremidad antes de colocarse la funda. Esto ayudará a mantener limpia la funda durante su uso. Se puede usar también ropa no restrictiva, como pants o playeras de algodón, siempre y cuando tales prendas sean seguras cuando haya compresión contra la piel y no causen daños a la funda.

Fundas para pierna

Hay dos métodos de aplicación:

Método A:

Paso 1. Acomode sin apretar la funda alrededor de su pierna y luego abroche las cintas de gancho (4.1).

Paso 2. Con el pie de la funda alejado de usted, meta la pierna a la funda hasta que llegue a la rodilla (la parte inferior de la pierna se muestra en 4.2) o hasta arriba del muslo (la pierna completa se muestra en 4.3). **Nota:** No se ponga de pie ni camine cuando tenga puestas las fundas para pierna. Foto con fines ilustrativos solamente.

Paso 3. Reajuste el material de gancho y bucle de la funda, si es necesario, para que quede segura y cómoda en su pierna (4.4). Al inflarse la funda aplicará una compresión inteligente en función del tamaño de su extremidad, de modo que no es necesario que la funda esté ceñida o aplique compresión al ponérsela.



(4.1)



(4.2)



(4.3)



(4.4)

Fundas para pierna

Método B:

Paso 1. Estando sentado o recostado, desprenda el material de gancho y bucle de la funda y ábrala (4.5).

Paso 2. Meta su pie en el pie de la funda, hasta que su talón esté cómodamente colocado en el talón de la funda (4.6).

Paso 3. Empezando por el tobillo, fije la funda en su sitio alrededor de su pierna utilizando el material de gancho y bucle (4.7). Al inflarse la funda aplicará compresión, así que no es necesario que la funda esté apretada o ceñida, o hacer compresión al ponérsela.

Paso 4. Siga fijando la funda a su pierna hasta que quede completamente abrochada (4.8). Al colocársela, la funda debe sentirse cómoda y segura, pero no tan apretada que comprima la extremidad. La funda de pierna completa se muestra en (4.9). **Nota:** No se ponga de pie ni camine cuando tenga puestas las fundas para pierna. Foto con fines ilustrativos solamente.

Los dedos de su pie pueden o no llegar hasta la punta de la funda, dependiendo del tamaño de su pie. La funda no se debe apretar a tal grado que comprima sin haber sido inflada, y nunca debe doler. El conector de la funda se debe extender a partir el extremo de la funda más cercano al talón.



(4.5)



(4.6)



(4.7)



(4.8)



(4.9)

Fundas para brazo

Paso 1. Acomode sin apretar la funda alrededor de su brazo y luego abroche las cintas de enganche (4.10). Utilice el panel de enganche externo para brazos de mayor circunferencia. Doble el panel sobre sí mismo y use el panel de enganche interno para brazos de menor circunferencia.



(4.10)

Paso 2. Con el extremo curvado de la funda más cerca de usted, meta el brazo en la funda hasta que le llegue a la axila (4.11).



(4.11)

Paso 3. Cerciórese de que el extremo superior curvado de la funda esté colocado en el lado externo de su hombro (4.12). El extremo recto de la funda debe quedar colocado sobre la mano. Reajuste el material de gancho y bucle de la funda si es necesario para que quede segura y cómoda en su brazo. Al inflarse la funda aplicará una compresión inteligente en función del tamaño de su extremidad, de modo que no es necesario que apriete la funda o aplique compresión al ponérsela.



(4.12)

Sus dedos pueden o no llegar hasta la punta de la funda, todo depende del tamaño de su brazo. Al ponerse la funda, no debe quedar tan apretada que cause compresión; la funda nunca debe doler. El conector de la funda se debe extender desde el extremo de la funda más cercano a la muñeca.

Cómo quitarse la funda

Desconecte la funda de la UCP y permita que se desinfle lo que sea necesario. Para quitar la funda, saque su pierna o brazo de la funda o desprenda el material de gancho y bucle para quitarlo de su extremidad. Se recomienda mantener abrochado el material de gancho y bucle aunque no se esté usando la funda, para evitar que se enganche en la ropa, sábanas u otros materiales.

Seguridad

5



Advertencia: Peligro de explosión

No debe utilizarla en presencia de gases inflamables, incluidos los anestésicos inflamables.



Advertencia: Peligro de descarga eléctrica

No permita que entre líquido en ninguna parte del sistema.



Advertencia: Peligro de descarga eléctrica

Nunca intente darle mantenimiento o servicio al dispositivo mientras lo esté usando. Para eliminar completamente la corriente eléctrica, desconecte el alimentador de energía de la UCP o de la toma de corriente de la pared.



Advertencia: Peligro de descarga eléctrica

Para evitar una descarga eléctrica, no abra la UCP. No intente reparar usted mismo la unidad de control de presión. Todo tipo de reparaciones deben ser realizadas únicamente por el fabricante o por personal de servicio autorizado. Cualquier servicio realizado por personal no autorizado anulará la garantía.



Advertencia: Peligros de ventilación

Siempre coloque la bomba sobre una superficie sólida, sin objetos que puedan bloquear las aberturas de ventilación. Nunca bloquee las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación sin residuos, como pelusa o cabello. Nunca ponga a funcionar la bomba sobre una superficie suave, como una cama, sofá o almohada, porque la abertura de ventilación puede obstruirse. Nunca deje caer, ni inserte, ningún objeto en ninguna de las aberturas de la bomba.



Advertencia: Peligros para el medio ambiente

Mantenga la bomba, las fundas y el cable y el enchufe de alimentación de energía lejos de objetos cortantes, flamas y superficies calientes.



Advertencia: Se requiere una inspección adecuada

Antes de cada uso, inspeccione la unidad de control de presión, el alimentador de energía, las fundas y los conectores para ver si existen daños.



Advertencia: Tropiezos

Nunca ponga en funcionamiento el controlador si el cable o el arnés de mangueras representan un peligro de tropiezo.



Advertencia: Estrangulamiento

El cable de suministro de energía y las mangueras de este producto pueden representar un peligro de estrangulamiento. Mantenga el suministro de energía y las mangueras lejos del alcance de los niños en todo momento.



Advertencia: Lesiones por golpes

La unidad de control de presión debe estar colocada a la misma altura o debajo del paciente, para evitar que el dispositivo caiga sobre el paciente y le cause lesiones.



Advertencia: El tratamiento nunca debe causar dolor

La compresión de la funda nunca debe causar dolor. Si usted siente molestias o nota que su condición empeora, consulte a su médico. No cambie la configuración de su tratamiento sin antes consultar a su médico.



Advertencia: Supervisión de adultos

Los menores de 18 años solo pueden usar el sistema bajo la supervisión de un adulto y siguiendo las instrucciones del médico.



Precaución: Uso para un solo paciente

Las fundas están destinadas únicamente para el uso no ambulatorio de un solo paciente.



Precaución: Compatibilidad

Para el sistema medi pcs, solamente utilice el alimentador de energía (GSM60B24), las fundas y los accesorios de medi pcs.

Para información sobre el cuidado y mantenimiento de su unidad de control de presión (UCP), el conjunto del sistema, la programación del tratamiento, la detección y solución de problemas o información técnica, consulte el Manual del usuario que viene incluido con la UCP de medi PCS. Para traducciones a otros idiomas, visite www.mediusa.com.